

ECTIMER®

Instrukcja użytkowania

Przed zastosowaniem preparatu ECTIMER prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Należy zachować niniejszą ulotkę gdyż zawiera ona ważne informacje. W razie wątpliwości dotyczących sposobu użytkowania preparatu ECTIMER należy skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub wytwórcą.

1. Co to jest ECTIMER i jakie ma zastosowanie?

ECTIMER to wyrób medyczny zawierający ectoinę (Ectoin®), występującą w przyrodzie naturalną cząsteczkę chroniącą komórki, która wykazuje właściwości łagodzące stany zapalne i stabilizujące błony komórkowe.

ECTIMER to lekko hipertoniczny roztwór. Delikatnie oczyszcza jamę nosową, zapewnia nawilżenie, zabezpiecza przed wysychaniem i w naturalny sposób pomaga zmniejszyć obrzęk błony śluzowej, przez co ułatwia swobodne oddychanie.

ECTIMER jest przeznaczony do stosowania w profilaktyce i wspomaganiu leczenia nieżyty nosa i zapalenia zatok. Preparat redukuje stan zapalny podrażnionej śluzówki nosa.

ECTIMER łagodzi typowe objawy nieżyty nosa takie jak sucha, podrażniona i przekrwiona śluzówka nosa, kichanie, uczucie świądu w nosie oraz ogranicza tworzenie się strupów w jamie nosowej.

ECTIMER redukuje niekorzystny wpływ alergenów i zanieczyszczonego powietrza na śluzówkę oraz wspiera regenerację podrażnionej śluzówki nosa.

ECTIMER nie zawiera konserwantów.

ECTIMER jest odpowiedni dla dzieci i niemowląt od 1 miesiąca życia.

ECTIMER jest odpowiedni dla wrażliwych nosów i może być stosowany codziennie.

2. Ostrzeżenia i środki ostrożności.

Preparatu ECTIMER nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na ectoinę (Ectoin®) lub inne składniki sprayu do nosa.

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy natychmiast zaprzestać stosowania preparatu.

3. Co należy wiedzieć przed użyciem sprayu ECTIMER.

Obecnie nie ma żadnych danych dotyczących reakcji między sprayem ECTIMER a innymi preparatami do nosa.

4. Sposób użycia sprayu ECTIMER.

Spray ECTIMER należy zawsze stosować zgodnie z instrukcją użytkowania. W razie wątpliwości przed zastosowaniem preparatu ECTIMER należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Osoby, które nie są w stanie samodzielnie zaaplikować sprayu powinny poprosić o pomoc.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, spray aplikować do każdego otworu nosowego 2-6 razy dziennie lub tak często jak to potrzebne.

ECTIMER może być aplikowany pod dowolnym kątem, a końcówka jest odpowiednio dostosowana do delikatnych nosów.

Dzieci powyżej 12 roku życia i dorośli:

1. Przed użyciem sprayu ECTIMER delikatnie oczyść nozdrza.
2. Zdejmij nasadkę ochronną z butelki.
3. Trzymaj głowę w pozycji wyprostowanej.
4. Delikatnie wprowadź końcówkę do jednego otworu nosowego i naciśnij aplikator uwalniając spray.
5. Wyjmij aplikator z nozdrza.
6. Opcjonalnie: delikatnie naciśnij palcem na zaaplikowane nozdrze.
7. Powtórz czynności opisane powyżej dla drugiego nozdrza.
8. Wydmuchaj nos.
9. Przemyj końcówkę sprayu ciepłą wodą i wytrzyj do sucha.
10. Nałóż nasadkę ochronną na butelkę.

Niemowlęta i dzieci do 11 roku życia:

1. Ułóż niemowlę w pozycji leżącej lub poproś dziecko, aby usiadło z wyprostowaną głową.
2. Delikatnie oczyść nos.
3. Zdejmij nasadkę ochronną z butelki.
4. Delikatnie wprowadź końcówkę do jednego otworu nosowego i naciśnij aplikator uwalniając spray.
5. Wyjmij aplikator z nozdrza.
6. Opcjonalnie: delikatnie naciśnij palcem na zaaplikowane nozdrze lub poproś o to dziecko jeśli jest samodzielne.
7. Upewnij się, że nadmiar płynu wypłynął z nozdrza i delikatnie wytrzyj nos chusteczką.
8. Powtórz czynności opisane powyżej dla drugiego nozdrza.
9. Przemyj końcówkę sprayu ciepłą wodą i wytrzyj do sucha.
10. Nałóż nasadkę ochronną na butelkę.

Aby zapewnić bezpieczeństwo i higienę, każda butelka powinna być stosowana tylko przez jedną osobę.

5. Możliwe działania niepożądane.

ECTIMER jest dobrze tolerowanym preparatem. Do tej pory nie odnotowano regularnie występujących lub utrzymujących się działań niepożądanych. O wszelkich działaniach niepożądanych związanych ze stosowaniem sprayu ECTIMER należy poinformować lekarza, farmaceutę lub wytwórcę. W przypadku utrzymania się lub nasilenia niekorzystnych objawów należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

6. Informacje dodatkowe i przechowywanie.

Data ważności sprayu ECTIMER jest umieszczona na opakowaniu zewnętrznym i butelce.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Przechowywać w temperaturze od 2°C do 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Pojemnik pod ciśnieniem: należy chronić przed światłem słonecznym i nie wystawiać na działanie wysokich temperatur powyżej 50°C.

Nie dziurawić, nie palić nawet pustych opakowań.

7. Postać preparatu.

spray 100 ml

Skład: ektoina (Ectoin®), woda morska, woda oczyszczona

8. Wytwórca:

 bitop AG

Stockumer Str. 28,

58453 Witten, Niemcy 

Dystrybutor:




Solinea Sp. z o.o. Sp.K.

Elizówka 65

21-003 Ciecierzyn, Polska

Stan informacji: **11.2021**

Oznaczenie symboli na opakowaniu:

 – znak CE

 – numer partii

 – wytwórca

 – zapoznać się z instrukcją użytkowania

 – termin ważności

 – zachować ostrożność, zapoznać się z instrukcją (ostrzeżenia/ środki ostrożności)

 ^{25°C} – temperatura przechowywania

Dostępne są również:

SOLIK®

spray do nosa z ektoiną

SOLIK ma formę roztworu izotonicznego, który nawilża suchą i podrażnioną śluzówkę nosa.

SOLIK jest przeznaczony do stosowania w profilaktyce i wspomaganiu leczenia objawów **zespołu suchego nosa**.

Spray 20 ml

ECTORHIN®

hipertoniczny spray do nosa z ektoiną

ECTORHIN to hipertoniczny roztwór o działaniu obkurczającym śluzówkę, przez co pozwala na łatwiejsze usunięcie nadmiaru wydzieliny na zewnątrz, nie powodując wysuszenia śluzówki.

ECTORHIN to spray do nosa przeznaczony do stosowania w profilaktyce i wspomaganiu leczenia objawów **nieżyty nosa i zapalenia zatok**.

Spray 20 ml