



Ecto clarin

Instrukcja użytkowania

Przed zastosowaniem preparatu ECTOCLARIN prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Należy zachować niniejszą ulotkę gdyż zawiera ona ważne informacje. W razie wątpliwości dotyczących sposobu użytkowania preparatu należy skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub wytwórcą.

1. Co to jest ECTOCLARIN i jakie ma zastosowanie.

ECTOCLARIN to wyrób medyczny zawierający ektoinę (Ectoin®), występującą w przyrodzie naturalną cząsteczkę chroniącą komórki która wykazuje właściwości łagodzące stany zapalne i stabilizujące błony komórkowe.

ECTOCLARIN to spray do nosa przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu objawów alergicznego nieżytu nosa. Preparat skutecznie łagodzi typowe objawy takie jak katar, uczucie świądu w nosie, przekrwienie śluzówki nosa, kichanie.

ECTOCLARIN to lekko hipertoniczny roztwór który chroni przed szkodliwym wpływem alergenów. Preparat wspiera regenerację podrażnionej przez alergeny błony śluzowej nosa.

ECTOCLARIN nie zawiera konserwantów i jest odpowiedni dla wrażliwych nosów. ECTOCLARIN nie wywołuje efektu przyzwyczajenia.

2. Ostrzeżenia i środki ostrożności.

Preparatu ECTOCLARIN nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na ektoinę (Ectoin®) lub inne składniki sprayu do nosa.

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy natychmiast zaprzestać stosowania preparatu.

Ze względów higienicznych każda butelka ze sprayem powinna być używana przez jedną osobę.

Po otwarciu nie stosować dłużej niż 3 miesiące.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Nie stosować jeżeli opakowanie jest uszkodzone lub przebite.

3. Co należy wiedzieć przed użyciem ECTOCLARIN.

Obecnie nie ma żadnych danych dotyczących interakcji między ECTOCLARIN a innymi preparatami do nosa.

4. Sposób użycia ECTOCLARIN.

ECTOCLARIN należy zawsze stosować zgodnie z instrukcją użytkowania.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, aplikować 1-2 razy do każdego otworu nosowego, kilka razy dziennie. Dzieci w wieku poniżej 2 lat nie powinny stosować produktu częściej niż 10 razy dziennie (2 aplikacje do każdego z nozdrzy). Osoby w wieku powyżej 2 lat mogą stosować produkt bez ograniczeń. ECTOCLARIN nie powinien być stosowany dłużej niż przez 30 kolejnych dni.

Przed pierwszym użyciem sprayu ECTOCLARIN należy zdjąć nasadkę i nacisnąć pompkę dwu-trzykrotnie aż do pojawienia się mgiełki. Nie należy przecinać końcówki. Jeśli mechanizm sprayu nie działa poprawnie (np. gdy butelka nie znajduje się w pozycji pionowej), należy kilkakrotnie wcisnąć pompkę w pozycji pionowej.

1. Delikatnie wydmuchaj nos, w celu oczyszczenia nozdrzy.
2. Zdejmij nasadkę ochronną z butelki.
3. Palec wskazujący i środkowy umieść po obu stronach aplikatora, a kciuk pod butelką. Pochyl głowę lekko do przodu i zamknij jedno nozdrze (delikatnie przyciskając palcem płatek nosa).
4. Oddychaj spokojnie.
5. Zdecydowanym ruchem naciśnij pompkę, aby zaaplikować dawkę do nozdrza jednocześnie delikatnie wdychając powietrze.
6. Włóż końcówkę aplikatora do drugiego nozdrza.
7. Powtórz czynności opisane powyżej dla drugiego nozdrza.
8. Przetrzyj końcówkę sprayu czystą chusteczką.
9. Nałóż nasadkę na butelkę.

5. Możliwe działania niepożądane.

ECTOCLARIN jest dobrze tolerowanym preparatem. Do tej pory nie odnotowano regularnie występujących lub utrzymujących się działań niepożądanych. O wszelkich działaniach niepożądanych związanych ze stosowaniem ECTOCLARIN należy poinformować lekarza, farmaceutę lub wytwórcę. W przypadku utrzymania się lub nasilenia niekorzystnych objawów należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

6. Przechowywanie.

Data ważności ECTOCLARIN jest umieszczona na opakowaniu i etykiecie butelki.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Przechowywać w temperaturze od 2°C do 25°C.

7. Dodatkowe informacje.

Stosowanie zgodne z zaleceniami nie stwarza ryzyka dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

ECTOCLARIN jest odpowiedni dla dzieci.

Dzieci w wieku poniżej 10 lat oraz osoby niezdolne do samodzielnego stosowania powinny otrzymać pomoc przy aplikacji.

8. Postać preparatu.

Spray 20 ml

Skład: ektoina (Ectoin®), sól morską, woda, bufor fosforanowy.

Jedna aplikacja to 0,14 ml roztworu.

Wytwórca:

 bitop AG
Stockumer Str. 28,
58453 Witten, Niemcy




Dystrybutor:



Solinea Sp. z o.o. Sp.K.
Elizówka 65
21-003 Ciecierzyn, Polska


Stan informacji: **09.2021**

Oznaczenie symboli na opakowaniu:


 – znak CE


 – numer partii

 – wytwórca

 – zapoznać się z instrukcją użytkownika

 – termin ważności

 – nie stosować gdy produkt jest uszkodzony

 – temperatura przechowywania

Dostępne są również:

ALECTOIN

krople do oczu z ektoiną

ALECTOIN krople do oczu z ektoiną to izotoniczny roztwór przeznaczony do stosowania **w profilaktyce i wspomaganiu leczenia objawów alergicznego zapalenia spojówek**. W swoim składzie zawiera **ektoinę 2%** (Ectoin®) posiadającą właściwości ochronne i nawilżające oraz hydroksyetylocelulozę, zwiększającą lepkość kropli.

Krople do oczu 10 ml

ECTODOSE

— ROZTWÓR DO INHALACJI Z EKTOINĄ —

Ectodose to izotoniczny roztwór do inhalacji z ektoiną stosowany wspomagająco w łagodzeniu stanów zapalnych oraz objawów chorób układu oddechowego - **w astmie alergicznej i niealergiczej, przy zapaleniu oskrzeli, a także w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP)**.

20 ampułek do inhalacji o pojemności 2,5 ml każda.