

ECTORHIN®

Instrukcja użytkowania

Przed zastosowaniem preparatu ECTORHIN prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Należy zachować niniejszą ulotkę gdyż zawiera ona ważne informacje. W razie wątpliwości dotyczących sposobu użytkowania preparatu należy skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub wytwórcą.

1. Co to jest ECTORHIN i w jakim celu się go stosuje?

ECTORHIN to spray do nosa przeznaczony do stosowania w profilaktyce i wspomaganiu leczenia objawów nieżyty nosa i zapalenia zatok.

ECTORHIN to wyrób medyczny zawierający ektoinę [Ectoin®], występującą w przyrodzie naturalną cząsteczkę chroniącą komórki, która wykazuje właściwości łagodzące stany zapalne i stabilizujące błony komórkowe.

Na podstawie badań przedklinicznych wykazano, że Ectoin Hydro Complex i ustabilizowana struktura śluzówki pomagają ograniczyć wnikanie wirusów. Ectorhin to hipertoniczny roztwór naturalnie zmniejszający przekrwienie nosa i zatok. Ectorhin wykazuje klinicznie udowodnioną taką samą skuteczność jak powszechnie stosowane leki zmniejszające przekrwienie nosa (np. z ksylometazoliną).

Ectorhin pomaga ograniczyć stosowanie sprayów do nosa zmniejszających przekrwienie oraz pozwala zmniejszyć ich negatywne działania uboczne takie jak przesuszenie błony śluzowej nosa.

Ectorhin wykazuje efekt 4 w 1. Znacząco redukuje objawy takie jak zatłakany nos, katar, ból twarzy i głowy oraz utratę zapachu i smaku. Ectorhin wspiera proces regeneracji podrażnionego nabłonka. Łagodzi objawy takie jak suchość i podrażnienie śluzówki nosa, kichanie, uczucie świądu oraz ogranicza tworzenie się strupów.

ECTORHIN nie zawiera konserwantów. Ectorhin nie wywołuje efektu przyzwyczajania.

2. Ostrzeżenia i środki ostrożności.

Preparatu ECTORHIN nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na ektoinę [Ectoin®] lub inne składniki sprayu do nosa.

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy natychmiast zaprzestać stosowania preparatu.

Ze względów higienicznych każda butelka ze sprayem powinna być używana przez jedną osobę.

Po otwarciu nie stosować dłużej niż 3 miesiące.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Nie stosować jeżeli opakowanie jest uszkodzone lub przebite.

3. Co należy wiedzieć przed użyciem sprayu ECTORHIN.

Obecnie nie ma żadnych danych dotyczących reakcji między preparatem ECTORHIN a innymi preparatami do nosa.

4. Sposób użycia preparatu ECTORHIN.

ECTORHIN należy zawsze stosować zgodnie z instrukcją użytkowania.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, aplikować 1-2 razy do każdego otworu nosowego, kilka razy dziennie. Dzieci w wieku poniżej 2 lat nie powinny stosować produktu częściej niż 10 razy dziennie (2 aplikacje do każdego z nozdrzy). Osoby w wieku powyżej 2 lat mogą stosować produkt bez ograniczeń. Ectorhin nie powinien być stosowany dłużej niż przez 30 kolejnych dni.

Przed pierwszym użyciem sprayu ECTORHIN należy zdjąć nasadkę i nacisnąć pompkę dwu-trzykrotnie aż do pojawienia się mgiełki. Nie należy przecinać końcówki. Jeśli mechanizm sprayu nie działa poprawnie (np. gdy butelka nie znajduje się w pozycji pionowej), należy kilkakrotnie wcisnąć pompkę w pozycji pionowej.

1. Delikatnie wydmuchaj nos, w celu oczyszczenia nozdrzy.
2. Zdejmij nasadkę ochronną z butelki.
3. Palec wskazujący i środkowy umieść po obu stronach aplikatora, a kciuk pod butelką. Pochyl głowę lekko do przodu i zamknij jedno nozdrze [delikatnie przyciskając palcem płatek nosa].
4. Oddychaj spokojnie.
5. Zdecydowanym ruchem naciśnij pompkę, aby zaaplikować dawkę do nozdrza jednocześnie delikatnie wdychając powietrze.
6. Włóż końcówkę aplikatora do drugiego nozdrza.
7. Powtórz czynności opisane powyżej dla drugiego nozdrza.
8. Przetrzyj końcówkę sprayu czystą chusteczką.
9. Nałóż nasadkę na butelkę.



5. Możliwe działania niepożądane.

ECTORHIN jest dobrze tolerowanym preparatem. Do tej pory nie odnotowano regularnie występujących lub utrzymujących się działań niepożądanych. O wszelkich działaniach niepożądanych związanych ze stosowaniem ECTORHIN należy poinformować lekarza, farmaceutę lub wytwórcę. W przypadku utrzymania się lub nasilenia niekorzystnych objawów należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

6. Przechowywanie

Data ważności ECTORHIN jest umieszczona na opakowaniu i etykiecie butelki.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Przechowywać w temperaturze od 2°C do 25°C.

7. Dodatkowe informacje

Stosowanie zgodne z zaleceniami nie stwarza ryzyka dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Ectorhin jest odpowiedni dla dzieci.

Dzieci w wieku poniżej 10 lat oraz osoby niezdolne do samodzielnego stosowania powinny otrzymać pomoc przy aplikacji.

8. Postać preparatu.

Spray 20 ml

Skład: ektoina (Ectoin®), sól morską, woda, bufor fosforanowy.

Jedna aplikacja to 0,14 ml roztworu.

Stan informacji: **06.2021**

Oznaczenie symboli na opakowaniu:

CE – znak CE

LOT – numer partii

– wytwórca

– zapoznać się z instrukcją użytkowania

– termin ważności

– nie stosować gdy produkt jest uszkodzony

– temperatura przechowywania

Wytwórca:

bitop AG
Stockumer Str. 28,
58453 Witten, Niemcy



Dystrybutor:



Solinea Sp. z o.o. Sp.K.
Elizówka 65
21-003 Ciecierzyn, Polska

Dostępne są również:

SOLIK®

spray do nosa z ektoiną

SOLIK ma formę roztworu izotonicznego, który nawilża suchą i podrażnioną śluzówkę nosa.

SOLIK jest przeznaczony do stosowania w profilaktyce i wspomaganie leczenia objawów **zespołu suchego nosa**.

Spray 20 ml

NOT22813V03

ECTIMER®

woda morską z ektoiną

ECTIMER to lekko hipertoniczny roztwór. Delikatnie oczyszcza jamę nosową, zapewnia nawilżenie, zabezpiecza przed wysychaniem i w naturalny sposób pomaga zmniejszyć obrzęk błony śluzowej, przez co ułatwia swobodne oddychanie.

ECTIMER jest przeznaczony do stosowania w profilaktyce i wspomaganie leczenia objawów **nieżyty nosa i zapalenia zatok**.

ECTIMER jest odpowiedni dla dzieci i niemowląt od 1 miesiąca życia.

Spray do nosa 100 ml

