

## PRZECIWWSKAZANIA:

Zestawu nie powinny stosować osoby z całkowicie zablokowaną przegrodą nosową lub z infekcją ucha. Po odbytej operacji ucha przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem. Jeśli dziecko ma mniej niż 4 lata przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na chlorek sodu. Nie należy stosować po upływie daty ważności. Do płukania nie używać wrzątku ani gorącej wody. Nie używać nieprzegotowanej wody z kranu.

## INFORMACJE DODATKOWE I PRZECHOWYWANIE:

Po każdorazowym użyciu należy dokładnie umyć butelkę i nakrętkę. Wszystkie elementy zestawu należy przechowywać czyste i suche. Nie używać w przypadku uszkodzenia którejkolwiek z części zestawu. Zestaw używać tylko w celu do którego jest przeznaczony. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w suchym miejscu, w temp. pokojowej.

## INTERAKCJE:

Nie stwierdzono.

## DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

Nie występują w przypadku prawidłowego używania zgodnie z instrukcją użycia.

## SKŁAD:

100% chlorek sodu *Ph.Eur.*

Wyrób medyczny **CE**

Oznaczenie symboli na opakowaniu:

 data ważności

 numer serii

 przed użyciem zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania

stan informacji: 11.2018

## WYTWÓRCA:



Solinea Sp. z o.o. Sp. K.  
Elizówka 65, HALA I  
21-003 Ciecierzyn, Polska

# FIXSIN

# FIXSIN hipertonic

# FIXSIN junior

Niniejsza ulotka zawiera informacje dotyczące użytkowania preparatów z linii FIXSIN, w skład której wchodzi: FIXSIN (zestaw podstawowy), FIXSIN (zestaw uzupełniający), FIXSIN junior oraz FIXSIN hipertonic.

FIXSIN oraz FIXSIN junior to zestawy do płukania nosa i zatok. Preparaty zawierają substancję rozpuszczaną, chlorek sodu, przeznaczoną do sporządzenia roztworu stosowanego do płukania nosa i zatok. Zestawy FIXSIN udrażniają oraz oczyszczają nos i zatoki z nadmiernej wydzieliny oraz zalegającego śluzu, ograniczając gromadzenie się czynników mających wpływ na powstawanie infekcji. Dodatkowo, dzięki hipertonicznemu stężeniu chlorku sodu zestawu FIXSIN hipertonic, roztwór działa obkurczająco na śluzówkę, pozwalając na łatwiejsze usunięcie wydzieliny na zewnątrz.

## WSKAZANIA:

Każdy z zestawów zaleca się stosować w celu prewencyjnej, objawowej lub pooperacyjnej pielęgnacji nosa i zatok, głównie w przypadku:

- zapalenia zatok przynosowych
- nieżyty nosa różnego pochodzenia
- przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok
- dla utrzymania higieny nosa i zatok

## DOSTĘPNE OPAKOWANIA PREPARATU:

FIXSIN zestaw podstawowy do płukania nosa i zatok, zawiera:

- ✓ 1 butelkę (poj. 240 ml)
- ✓ 15 saszetek FIXSIN z proszkiem do sporządzenia roztworu (2,15 g każda)
- ✓ ulotkę informacyjną

FIXSIN zestaw uzupełniający do płukania nosa i zatok, zawiera:

- ✓ 30 saszetek FIXSIN z proszkiem do sporządzenia roztworu (2,15 g każda)
- ✓ ulotkę informacyjną

FIXSIN hipertonic zestaw uzupełniający do płukania nosa i zatok, zawiera:

- ✓ 30 saszetek FIXSIN hipertonic z proszkiem do sporządzenia roztworu (4,8 g każda)
- ✓ ulotkę informacyjną

FIXSIN junior zestaw do płukania nosa i zatok dla dzieci, zawiera:

- ✓ 1 butelkę (poj. 120 ml)
- ✓ 30 saszetek FIXSIN junior z proszkiem do sporządzenia roztworu (1,08 g każda)
- ✓ ulotkę informacyjną

## SPOSÓB UŻYCIA:

Do przeprowadzenia płukania niezbędna jest butelka dostępna w zestawach **FIXSIN** zestaw podstawowy lub **FIXSIN junior**.

Płukanie przeprowadzać 1-2 razy dziennie lub według wskazań lekarza. Godzinę po płukaniu nie należy wychodzić na zewnątrz (przy temp. poniżej 19°C). Płukanie należy przeprowadzić najpóźniej na godzinę przed snem. Każdorazowo przed przystąpieniem do płukania należy sprawdzić temperaturę wody.


Zestaw jest bezpieczny i może być stosowany u dzieci powyżej 4 roku życia. Dzieci mogą stosować zestaw jedynie pod kontrolą osoby dorosłej.

Zestaw jest bezpieczny dla kobiet w ciąży i karmiących piersią. Preparat nie wpływa negatywnie na prowadzenie i obsługę maszyn i urządzeń mechanicznych.

Po przeprowadzeniu płukania w obrębie jamy nosowej może wystąpić lekkie uczucie pieczenia.

Jedna saszетка wybranego zestawu FIXSIN w połączeniu z odpowiednią ilością wody (zgodnie z pojemnością butelki wybranego zestawu) tworzy gotowy roztwór do płukania nosa i zatok.

Do sporządzenia roztworu należy stosować tylko wskazane ilości wody: **FIXSIN, FIXSIN hipertonic – 240 ml, FIXSIN junior – 120 ml.**

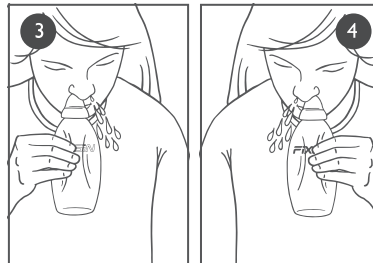

Postępuj zgodnie z instrukcją użycia i według zaleceń lekarza:

1. Do płukania należy używać tylko oryginalnych i czystych elementów zestawu **FIXSIN**.
2. Wsypać zawartość saszetek do butelki, (rys. 1)
3. Butelkę napęczyć przegotowaną wodą (o temp. ciała) do poziomu oznaczonego linią odpowiednio 120 ml lub 240 ml, (rys. 2)
4. Dokładnie zakręcić butelkę i potrząsać w celu rozpuszczenia substancji w wodzie.
5. Przyłożyć końcówkę butelki do otworu nosowego. Oddychać przez usta.
6. Płynnym ruchem ścisnąć butelkę tak, aby roztwór ciąglym strumieniem dostał się do nosa i wypłynął drugim otworem nosowym (rys. 3).
7. Płukanie powtórzyć w drugim otworze nosowym (rys. 4). Resztę roztworu użyć w razie potrzeby, natychmiast po przygotowaniu.
8. Nie połykać roztworu.
9. Po zakończeniu płukania oczyścić nos poprzez wydychanie.
10. Niewykorzystaną ilość roztworu wylać.