

Pantherin ecto

żel do nosa nawilżająco - łagodzący

| Z EKTOINĄ |

Żel do nosa Pantherin ecto dzięki zawartości składników czynnych wykazuje silne właściwości nawilżająco-łagodzące, a dodatkowo wspomaga regenerację błony śluzowej nosa.

Pantherin ecto to wyrób medyczny zawierający w swoim składzie ektoinę – (Ectoin®), występującą w przyrodzie, naturalną cząsteczkę chroniącą komórki, która wykazuje właściwości łagodzące stany zapalne i stabilizujące błony komórkowe.

Pantherin ecto tworzy warstwę ochronną tzw. „Ectoin® Hydro Complex” na błonie śluzowej nosa, przez co zapobiega jej wysychaniu oraz utrzymuje prawidłowe nawilżenie, nie powodując uczucia lepkości. Żel stabilizuje błonę komórkową, zmniejszając ryzyko wystąpienia infekcji bakteryjnych i wirusowych jamy nosowej.

Dzięki zawartości D-pantenolu (naturalnego składnika błon śluzowych) oraz ektoiny preparat łagodzi podrażnienia oraz przyczynia się do regeneracji błony śluzowej nosa.

Pantherin ecto zabezpiecza błonę śluzową nosa przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.

ZASTOSOWANIE:

- wspomaga regenerację błony śluzowej nosa po zabiegach chirurgicznych
- długotrwale nawilża błonę śluzową nosa
- łagodzi podrażnienia i stan zapalny błony śluzowej nosa
- przewlekły zanikowy nieżyt błon śluzowych nosa
- chroni błonę śluzową nosa przed niekorzystnymi czynnikami środowiska (zapylenie i zanieczyszczenie powietrza)

POSTAĆ PREPARATU:

Preparat Pantherin ecto dostępny jest w postaci żelu (tuba) o poj. 15 ml.

DAWKOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA:

Pantherin ecto jest preparatem bezpiecznym, może być stosowany bez ograniczeń ilościowych, u dorosłych i dzieci, zgodnie z własnymi potrzebami. U większości osób uzyskuje się jednak wyraźną poprawę po zastosowaniu niewielkiej ilości żelu, 3-4 razy dziennie po 1 dawce do każdego otworu nosowego.

Pantherin ecto może być stosowany przez dłuższy okres, jednak w przypadku braku poprawy po ok. 14 dniach, należy zasięgnąć porady lekarza.

Preparat może być stosowany u kobiet w ciąży.

Preparat nie wpływa negatywnie na prowadzenie i obsługę maszyn i urządzeń mechanicznych.

PRZECIWWSKAZANIA:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie należy stosować żelu Pantherin ecto po upływie daty ważności. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, należy zaprzestać stosowania preparatu i skonsultować się z lekarzem.

INTERAKCJE:

Nie stwierdzono.

SKŁAD:

Woda oczyszczona, D-pantenol, *Pseudoalteromonas exopolysaccharides*, ektoina, gliceryna, glikol propylenowy, karboksymetyloceluloza, chlorek benzalkoniowy.

INFORMACJE DODATKOWE I PRZECHOWYWANIE:

Ze względów higienicznych oraz w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się infekcji, jedno opakowanie należy przeznaczyć dla jednej osoby.

Nie używać w przypadku uszkodzenia opakowania.

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Po operacjach i zabiegach chirurgicznych, przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Stosować zgodnie z przeznaczeniem. Unikać kontaktu z oczami.


Nie połykać.

JAK APLIKOWAĆ PANTHERIN ECTO


1) Zaaplikować żel bezpośrednio do nozdrzy.



2) Nałożyć małą ilość żelu na patyczek kosmetyczny i wprowadzić do nozdrzy.

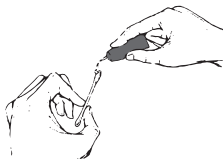

3) Nałożyć niewielką ilość żelu na palec i zaaplikować do nozdrzy.

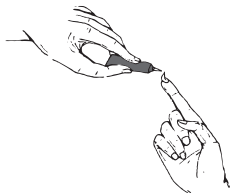

4) W celu równomiernego rozprowadzenia żelu na powierzchni śluzówki należy delikatnie pomasaż płatki nosa.



Wyrób medyczny **CE**

Oznaczenie symboli na opakowaniu:



data przydatności



numer partii



przed użyciem zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania

Stan informacji: 02.2018

WYTWÓRCA:



Solinea Sp. z o.o. Sp. K.
Elizówka 65, Hala I
21-003 Ciecierzyn, Polska
www.solinea.pl