

# RHINO ARGENT



**Rhinoargent** tworzy na powierzchni błony śluzowej nosa ochronny film, który zabezpiecza ją przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Preparat wspomaga regenerację błony śluzowej nosa.

## SPOSÓB UŻYCIA:

Postępuj zgodnie z instrukcją użycia lub według zaleceń lekarza.

**Krople:** Zakroplic do każdego otworu nosowego 2-3 krople.  
Aplikację powtarzać 3 razy dziennie.

**Spray:** 3-4 razy dziennie po jednej dawce do każdego otworu nosowego.

Preparat przeznaczony jest dla dzieci i dorosłych. W okresie ciąży i karmienia piersią, przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem. Preparat nie wpływa negatywnie na prowadzenie i obsługę maszyn i urządzeń mechanicznych.

## PRZECIWWSKAZANIA:

Nie należy stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie używać po upływie daty ważności.

## INTERAKCJE:

Nie stwierdzono.

## DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

Nie występują w przypadku postępowania zgodnie ze wskazaniami.

## SKŁAD:

Woda oczyszczona, chlorek sodu, chlorek potasu, gliceryna, karboksymetyloceluloza, olejek eukaliptusowy, substancje konserwujące: nanokoloid srebra, nanokoloid miedzi.

# RHINO ARGENT



## INFORMACJE DODATKOWE I PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić od światła. Stosować zgodnie z przeznaczeniem.

Unikać kontaktu z oczami. Nie połykać. W razie wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zaprzestać stosowania. Ze względów higienicznych oraz w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się infekcji, jedno opakowanie należy przeznaczyć dla jednej osoby. Nie używać w przypadku uszkodzenia opakowania. W przypadku sprayu: w razie zabrudzenia, zdjąć aplikator, wygotować lub opłukać wrzącą wodą.

## POSTAĆ PREPARATU:

Krople do nosa 15 ml

Spray do nosa (płyn z dozownikiem donosowym) poj. 20 ml.

Wyrób medyczny **CE**

Oznaczenia symboli na opakowaniu:



nr serii



data ważności



przed użyciem należy zapoznać się  
z ulotką dołączoną do opakowania

## WYTWÓRCA:

**SOLINEA**

Solinea Sp. z o.o. Sp. K.  
Elizówka 65  
21-003 Ciecierzyn

Stan informacji: 05.2021