



# Silaurum

na blizny

---

## ***silikonowy żel z nanokoloidem złota***

**Silaurum** żel na blizny to preparat do stosowania na blizny różnego pochodzenia. Preparat można stosować w leczeniu nowych, jak i już istniejących blizn.

### **Zastosowanie:**

- blizny pooperacyjne
- blizny pourazowe
- blizny pooparzeniowe
- blizny potrądzikowe

### **Mechanizm działania:**

Żel Silaurum zawiera w swoim składzie silikony (**polisiloksany i cyklopentasiloksan**), które tworząc na powierzchni skóry przezroczysty film, chronią ją przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, zapewniają odpowiedni poziom nawilżenia oraz tworzą mikrośrodowisko sprzyjające prawidłowemu i szybkiemu leczeniu blizn. Obecny w preparacie **nanokoloid złota** pobudza syntezę kolagenu oraz wykazuje właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne.

Silaurum żel na blizny:

- uelastycznia, zmiękcza i wygładza blizny, zmniejszając ich widoczność
- redukuje świąd, zaczerwienienie i odbarwienia

### **Sposób użycia:**

Niewielką ilość żelu nanieść na umytą i osuszoną powierzchnię blizny i delikatnie wmasować. Pozostawić do wyschnięcia. W przypadku niecałkowitego wchłonięcia preparatu, nadmiar usunąć. Preparat stosować 2 razy dziennie, minimum 2 miesiące.

**Skład:**

Polisiloksan, cyklopentasiloksan, nanokoloid złota, dwutlenek krzemu.

**Przeciwwskazania i środki ostrożności:**

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.

Nie stosować na niezagojone rany i błony śluzowe, stosować wyłącznie na nieuszkodzoną skórę.

Nie stosować na nałożone wcześniej preparaty zawierające antybiotyki lub inne leki.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Unikać kontaktu z oczami.

**Działania niepożądane i interakcje:**

Nie stwierdzono. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry, zaczerwienienia lub wysypki, należy zaprzestać stosowania.

**Informacje dodatkowe i przechowywanie:**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Stosować zgodnie z przeznaczeniem.


**Postać preparatu:**

Preparat Silaurum dostępny jest w postaci żelu (tuba) o pojemności 15 ml.

**Oznaczenie symboli na opakowaniu:**

 - data ważności

 - numer partii

 - przed użyciem zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania

Wyrób medyczny 

Stan informacji: 03.2017

**Wytwórca:**





Solinea Sp. z o.o. Sp. K.  
Elizówka 65, Hala I

21-003 Ciecierzyn, Polska