

SOLIK®

Instrukcja użytkowania

Przed zastosowaniem preparatu SOLIK prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Należy zachować niniejszą ulotkę gdyż zawiera ona ważne informacje. W razie wątpliwości dotyczących sposobu użytkowania preparatu SOLIK należy skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub wytwórcą.

1. Co to jest SOLIK i jakie ma zastosowanie?

SOLIK to wyrób medyczny zawierający ektoinę [Ectoin®], występującą w przyrodzie naturalną cząsteczkę chroniącą komórki, która wykazuje właściwości łagodzące stany zapalne i stabilizujące błony komórkowe.

SOLIK to spray do nosa przeznaczony do stosowania w profilaktyce i wspomaganiu leczenia objawów zespołu suchego nosa. SOLIK ma formę roztworu izotonicznego, który nawilża suchą i podrażnioną śluzówkę nosa.

Ponadto SOLIK łagodzi stany zapalne wywołane przez suchą i podrażnioną śluzówkę nosa, które często stanowią istotną dolegliwość w zespole suchego nosa. SOLIK skutecznie oddziałuje na typowe objawy tej dolegliwości, w tym ogranicza tworzenie się strupów i łagodzi uczucie świądu w nosie.

SOLIK chroni błonę śluzową przed wysychaniem oraz wspiera regenerację wrażliwej śluzówki nosa.

SOLIK można stosować również profilaktycznie np. w przypadku kontaktu z suchym powietrzem w ogrzewanych lub klimatyzowanych pomieszczeniach.

SOLIK nie zawiera konserwantów.

2. Ostrzeżenia i środki ostrożności.

Preparat SOLIK może być stosowany po zabiegach chirurgicznych nosa lub urazach nosa po wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Nie należy stosować preparatu SOLIK w przypadku nadwrażliwości na ektoinę [Ectoin®] lub którykolwiek ze składników sprayu do nosa. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy natychmiast zaprzestać stosowania sprayu SOLIK. Ze względów higienicznych spray powinien być używany tylko przez jedną osobę. Po otwarciu nie stosować dłużej niż 6 tygodni.

3. Co należy wiedzieć przed użyciem sprayu SOLIK.

Obecnie nie ma żadnych danych dotyczących interakcji między sprayem SOLIK a innymi preparatami do nosa.

4. Stosowanie preparatu w trakcie ciąży i karmienia piersią.

Obecnie nie ma żadnych danych dotyczących stosowania sprayu SOLIK podczas ciąży i karmienia piersią. W przypadku ciąży lub podejrzenia ciąży przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

5. Sposób użycia sprayu SOLIK.

SOLIK należy zawsze stosować zgodnie z instrukcją użytkowania. W razie wątpliwości przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, aplikować 1-2 dawki do każdego otworu nosowego, kilka razy dziennie.

Dzieci w wieku do 10 lat powinny używać preparat SOLIK pod nadzorem osoby dorosłej.

Przed pierwszym użyciem sprayu SOLIK należy zdjąć nasadkę ochronną i nacisnąć pompkę dwu-trzykrotnie aż do momentu pojawienia się mgiełki. Nie należy przecinać końcówki. Jeśli mechanizm sprayu nie działa poprawnie (np. gdy butelka nie znajduje się w pozycji pionowej), należy kilkakrotnie wcisnąć pompkę w pozycji pionowej.

1. Delikatnie wydmuchaj nos, w celu oczyszczenia nozdrzy.
2. Zdejmij nasadkę ochronną z butelki.
3. Palec wskazujący i środkowy umieść po obu stronach aplikatora, a kciuk pod butelką. Pochyl głowę lekko do przodu i zamknij jedno nozdrze (delikatnie przyciskając palcem płatek nosa).
4. Oddychaj spokojnie.
5. Zdecydowanym ruchem naciśnij pompkę, aby zaaplikować dawkę do nozdrza.
6. Wtóż końcówkę aplikatora do drugiego nozdrza.
7. Powtórz czynności opisane powyżej dla drugiego nozdrza.
8. Przetrzyj końcówkę sprayu czystą chusteczką.
9. Nałóż nasadkę na butelkę.

6. Możliwe działania niepożądane.

SOLIK jest dobrze tolerowanym preparatem. Do tej pory nie odnotowano regularnie występujących lub utrzymujących się działań niepożądanych. O wszelkich działaniach niepożądanych związanych ze stosowaniem SOLIK należy poinformować lekarza, farmaceutę lub wytwórcę. W przypadku utrzymania się lub nasilenia niekorzystnych objawów należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

7. Informacje dodatkowe i przechowywanie.

Data ważności sprayu SOLIK jest umieszczona na opakowaniu i etykiecie butelki.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Przechowywać w temperaturze od 2°C do 25°C.

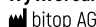
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

8. Postać preparatu.

Spray do nosa 20 ml

Skład: ektoina (Ectoin®), sól morską, woda, bufor fosforanowy.

Wytwórca:

 bitop AG
Stockumer Str. 28,
58453 Witten, Niemcy




Dystrybutor:




SOLINEA Sp. z o.o. Sp.K.
Elizówka 65, HALA I
21-003 Ciecierzyn, Polska
Infolinia: 0801703312


Stan informacji: **08.2017**

Oznaczenie symboli na opakowaniu:


 – znak CE

 – numer partii

 – wytwórca

 – zapoznać się z instrukcją użytkownika

 – termin ważności

 – zachować ostrożność, zapoznać się z instrukcją (ostrzeżenia/ środki ostrożności)

 – temperatura przechowywania

Dostępne są również:

ECTIMER®

woda morską z ektoiną

ECTIMER to lekko hipertoniczny roztwór. Delikatnie oczyszcza jamę nosową, zapewnia nawilżenie, zabezpiecza przed wysychaniem i w naturalny sposób pomaga zmniejszyć obrzęk błony śluzowej przez co ułatwia swobodne oddychanie.

ECTIMER jest przeznaczony do stosowania w profilaktyce i wspomaganie leczenia objawów **nieżyty nosa i zapalenia zatok**.

ECTIMER jest odpowiedni dla dzieci i niemowląt od 1 miesiąca życia.

Spray do nosa 100 ml

ECTORHIN®

hipertoniczny spray do nosa z ektoiną

ECTORHIN to hipertoniczny roztwór o działaniu obkurczającym śluzówkę przez co pozwala na łatwiejsze usunięcie nadmiaru wydzieliny na zewnątrz, nie powodując wysuszenia śluzówki.

ECTORHIN to spray do nosa przeznaczony do stosowania w profilaktyce i wspomaganie leczenia objawów **nieżyty nosa i zapalenia zatok**.

Spray 20 ml