



Silaurum

na blizny

silikonowy żel z nanokoloidem złota

Silaurum żel na blizny to wyrób medyczny do stosowania na blizny różnego pochodzenia. Preparat można stosować do wspomagania leczenia nowych, jak i już istniejących blizn.

Zastosowanie:

- blizny pooperacyjne
- blizny pourazowe
- blizny pooparzeniowe
- blizny potrądzikowe

Mechanizm działania:

Żel Silaurum zawiera w swoim składzie silikony (**polisiloksany i cyklopentasiloksan**), które tworząc na powierzchni skóry przezroczysty film, chronią ją przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, zapewniają odpowiedni poziom nawilżenia oraz tworzą mikrośrodowisko sprzyjające prawidłowemu i szybkiemu gojeniu blizn. Obecny w preparacie **nanokoloid złota** pobudza syntezę kolagenu oraz wykazuje właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne.

Silaurum żel na blizny:

- uelastycznia, zmiękcza i wygładza blizny, zmniejszając ich widoczność
- redukuje świąd, zaczerwienienie i odbarwienia

Sposób użycia:

Niewielką ilość żelu nanieść na umytą i osuszoną powierzchnię blizny i delikatnie wmasować. Pozostawić do wyschnięcia. W przypadku niecałkowitego wchłonięcia preparatu, nadmiar usunąć. Preparat stosować 2 razy dziennie, minimum 2 miesiące.

Skład:

Polisiloksany, cyklopentasiloksan, nanokoloid złota, dwutlenek krzemu.

Przeciwwskazania i środki ostrożności:

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.

Nie stosować na niezagojone rany i błony śluzowe, stosować wyłącznie na nieuszkodzoną skórę.

Nie stosować na nałożone wcześniej preparaty zawierające antybiotyki lub inne leki.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Unikać kontaktu z oczami.

Działania niepożądane i interakcje:

Nie stwierdzono. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry, zaczerwienienia lub wysypki, należy zaprzestać stosowania.

Informacje dodatkowe i przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Stosować zgodnie z przeznaczeniem.

Postać preparatu:

Preparat Silaurum dostępny jest w postaci żelu (tuba) o pojemności 15 ml.

Oznaczenie symboli na opakowaniu:

- data ważności



- numer partii



- przed użyciem zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania



- temperatura przechowywania

Wyrób medyczny 

Stan informacji: 04.2021

Wytwórca:

Solinea Sp. z o.o. Sp. K.

Elizówka 65

21-003 Ciecierzyn, Polska