

SOLWAX^{ACTIVE}

Aktywnie usuwa woskowinę uszną


Solwax active skutecznie usuwa złoży woskowiny usznej. Zapobiegając powstawaniu korka woskowinowego zmniejsza ryzyko wystąpienia zapalenia ucha. Unikalna formuła i wygodna forma preparatu gwarantuje bezpieczne stosowanie zarówno u dorosłych jak i u dzieci.

Solwax active jest zalecany w regularnej higienie uszu aby zapobiegać tworzeniu się złoży woskowiny. Przed użyciem preparatu u dzieci poniżej 12 roku życia należy zasięgnąć porady lekarza.



WSKAZANIA: Usuwanie złoży woskowiny usznej. Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zapalenia ucha.

SPOSÓB UŻYCIA, ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Przed użyciem należy buteleczkę ogrzać w dłoni, jeżeli lekarz nie zalecił inaczej, należy wkroplić do ucha 5-10 kropli, odczekać kilka minut, można zatkać ucho wacikiem. Zabieg należy powtarzać przez cztery dni rano i wieczorem.

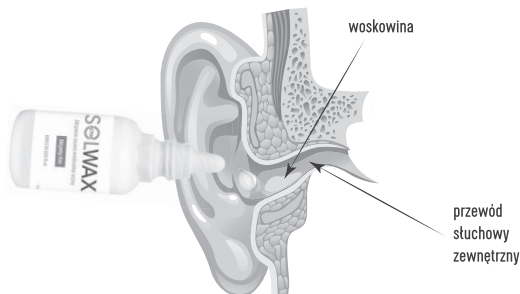

Nie należy wprowadzać dozownika do przewodu słuchowego zewnętrznego zbyt głęboko, jest to szczególnie ważne przy aplikacji u małych dzieci. Unikać kontaktu z oczami, nie połykać.

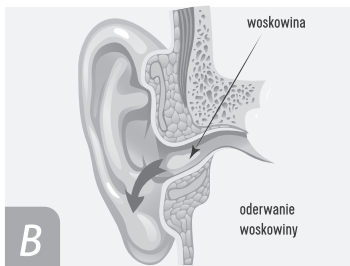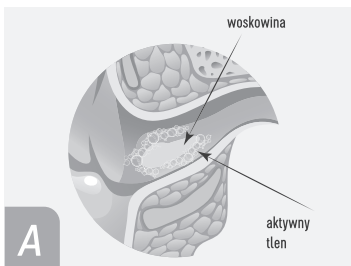

OPIS DZIAŁANIA: Solwax active zawiera aktywny związek nadtlenek karbamidu (urea peroxide). Urea peroxide uwalnia w uchu aktywny tlen (A), który powoduje oderwanie woskowiny od skóry przewodu słuchowego zewnętrznego (B). Solwax active zawiera również niejonowe związki powierzchniowo czynne pomagające w rozmięczeniu woskowiny oraz wzmacniające działanie preparatu.

PRZECIWWSKAZANIA: Nie należy stosować preparatu w przypadku bolesności ucha, perforacji błony bębenkowej, uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu oraz w przewlekłych stanach zapalnych ucha środkowego i przewodu słuchowego. Kobiety w ciąży, karmiące piersią, dzieci poniżej 12 roku powiny stosować Solwax active pod nadzorem lekarza.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE I INTERAKCJE: Nie stwierdzono. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w temperaturze pokojowej, chronić od światła, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Po otwarciu preparat należy zużyć w ciągu 6 miesięcy.

OPAKOWANIE: Opakowanie zawiera buteleczkę z 15 ml preparatu.

SKŁAD: Gliceryna, glikol propylenowy, nadtlenek karbamidu, woda oczyszczona, wersenian disodowy, kwas winowy, cytrynian sodu, alkohol etylowy.

Wydawany z polecenia lekarza lub farmaceuty.

KROPLE DO USZU 15 ml



www.solinea.pl

Wytwórca:

ARKONA Trade and Science Sp. Jawna
Nasutów 99 C, 21-025 Niemce, Polska



Dystrybutor:

Solinea Sp. z o.o. Sp. K.
Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn



Data ostatniej aktualizacji ulotki: 30/09/2021