

# Cornesin | Krople do oczu hipertoniczne

Hipertoniczne, sterylne krople do oczu.  
Bez konserwantów, 10 ml

Cornesin to wyrób medyczny zapewniający ulgę w objawach obrzęku rogówki.

Cornesin to hipertoniczne, sterylne krople do oczu, bez konserwantów, umieszczone w butelce o pojemności 10 ml.

Dzięki innowacyjnemu składowi, Cornesin wykazuje właściwości mukoadhezyjne pozwalające na lepsze przyleganie do powierzchni oka, zapewniając odpowiedni poziom nawodnienia oraz ochronę oka.

Cornesin to hipertoniczne, sterylne krople do oczu, bez konserwantów, wskazane w łagodzeniu objawów obrzęku rogówki, takich jak ból i zaburzenia widzenia.

Cornesin charakteryzuje się osmolarnością wyższą niż płyn łzowy: różnica ta jest niezbędna do reabsorpcji płynu obrzękowego. Stosowanie Cornesin zapewnia zwiększenie osmolarności powierzchni rogówki, umożliwiając przemieszczenie wody z głębszych warstw rogówki. Hialuronian sodu zawarty w Cornesin tworzy na powierzchni oka ochronną tarczę zapewniającą ochronę i odpowiednie nawilżenie. Hialuronian sodu, dzięki właściwościom nawilżającym i ochronnym redukuje uczucie pieczenia i podrażnienia roztworami hipertonicznymi oraz sprawia, że aplikacja Cornesin jest bardziej komfortowa.

## Skład:

Hialuronian sodu, kwas borny, Kolliphor P407, trometamol, sorbitol, woda.

## Jak stosować krople Cornesin?

- Przed użyciem produktu umyj ręce.
- Odchyl głowę do tyłu i odciągnij w dół dolną powiekę tworząc kieszonkę.
- Trzymaj butelkę pionowo nad okiem patrząc jednocześnie na niebieską końcówkę butelki.
- Delikatnie naciśnij butelkę, aplikując jedną kroplę do oka. Czynności powtórz dla drugiego oka.
- Zwróć uwagę aby końcówka butelki nie dotykała oka i palców.
- Po użyciu dokładnie zamknij butelkę.
- Aplikuj jedną lub dwie krople do każdego oka, co trzy lub cztery godziny lub zgodnie z zaleceniami lekarza.

## Ostrzeżenia:


- Nie stosować w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości lub alergii na którykolwiek ze składników preparatu.
- W przypadku podrażnienia oka należy zaprzestać stosowania i skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować produktu jeżeli opakowanie jest uszkodzone.
- Nie stosować produktu po upływie daty ważności.
- Zużyć w ciągu 8 tygodni od pierwszego otwarcia.
- Nie połykać.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Należy zachować ostrożność aby końcówka butelki nie dotykała oka ani palców.
- Produkt powinien być stosowany przez jedną osobę.
- W rzadkich przypadkach, po podaniu kropli Cornesin może wystąpić chwilowe zaburzenie widzenia związane z lepkością kropli. Należy odczekać kilka minut przed wykonywaniem czynności wymagających ostrości widzenia.
- Należy zdjąć soczewki kontaktowe przed użyciem kropli Cornesin, ponieważ ich powierzchnia może zostać uszkodzona. Należy odczekać przynajmniej 30 minut przed ponownym założeniem soczewek.
- Jeżeli stosowane są inne krople lub maści do oczu, należy odczekać przynajmniej 30 minut pomiędzy aplikacjami.
- Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed użyciem produktu powinny skonsultować się z lekarzem.
- Produkt jest przeznaczony do ciągłego stosowania przez nie więcej niż 7 kolejnych dni; jeżeli w tym czasie objawy nie ustępują należy skonsultować się z lekarzem.

Stan informacji: 10.2019

## Wytwórca:

 NTC S.r.l. Via Luigi Razza, 3  
20124 Mediolan, Włochy

## Dystrybutor:

 Solinea Sp. z o.o.  
Elizówka 65  
21-003 Ciecierzyn



LFHAG01501