

ARGENTIN-T

S P R A Y D O G A R D Ł A

WSKAZANIA:

Preparat wspomagający leczenie stanów zapalnych gardła, spowodowanych przez infekcje bakteryjne i wirusowe.

ZASTOSOWANIE:

ARGENTIN-T może być stosowany wspomagająco w leczeniu:

- Zapalenia migdałków podniebiennych,
- Zapalenia błony śluzowej gardła,
- Zapalenia błony śluzowej jamy ustnej,
- Stanu po usunięciu migdałków podniebiennych.

SKŁAD:

Woda oczyszczona, koloid Ag, wyciąg z irlandzkich glonów morskich, sole mineralne (chlorki), gliceryna, sorbitol, aromat miętowy.

MECHANIZM DZIAŁANIA:

ARGENTIN-T pokrywa błonę śluzową gardła ochronnym filmem. **ARGENTIN-T** łagodzi dzięki temu objawy zapalenia, takie jak ból i pieczenie. Obecne w preparacie cząstki srebra ograniczają rozwój drobnoustrojów.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE I INTERAKCJE:

Nie stwierdzono.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

PRZECIWSKAZANIA:

Nie należy stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u osób ze stwierdzoną alergią na srebro metaliczne.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Unikać kontaktu z oczami. W razie wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zaprzestać stosowania. Nie należy używać po upływie terminu ważności. Preparat może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Rys.1

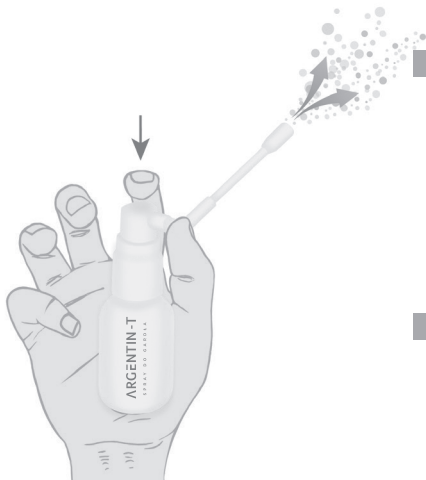

SPOSÓB UŻYCIA I DAWKOWANIE:

Przed pierwszym użyciem należy kilkakrotnie nacisnąć dozownik, aby wypełnić go płynem (Rys.1). Następnie umieścić aplikator możliwie jak najgłębiej w ustach i naciskając rozpylić 3-4 dawki w kierunku gardła (Rys.2). Aplikację powtarzać wielokrotnie, w zależności od potrzeb.

POSTAĆ I OPAKOWANIE:

Preparat dostępny jest w postaci sprayu (płynu z dozownikiem) o pojemności 20ml.


Rys.2



ARGENTIN-T

S P R A Y D O G A R D Ł A

WYTWÓRCA:

 ARKONA Trade and Science Sp. Jawna
Nasutów 99 C, 21-025 Niemce
Polska

DYSTRYBUTOR:



Solinea Sp. z o.o.
Elizówka, ul. Szafranowa 6
21-003 Ciecierzyn
Polska



Data ostatniej aktualizacji ulotki: 01/2024