

Pojemność 10 ml e

CITOGLA^{vis} LF

OMK1[®]-LF

Cytykolina i kwas hialuronowy w liposomalnym roztworze do oczu

Skład:

Sól sodowa cytykoliny, sól sodowa kwasu hialuronowego, fosfolipidy uwodornione, dwuzasadowy dihydrat fosforanu sodu, jednozasadowy dihydrat fosforanu sodu, chlorek sodu, woda wysoko oczyszczona.

Postać preparatu:

Citogla VIS LF OMK1[®]-LF to sterylny roztwór do oczu bez konserwantów w butelce o pojemności 10 ml.

Czym jest Citogla VIS LF OMK1[®]-LF?

Citogla VIS LF OMK1[®]-LF to roztwór do oczu z cytykolina (2%) i wysokocząsteczkowym kwasem hialuronowym (0,075%) w roztworze liposomalnym, który działa jako nośnik cytykoliny. Roztwór jest lekko opalizujący, koloru białego.

Dzięki cytykolinie, Citogla VIS LF OMK1[®]-LF stanowi nieodzowne wsparcie w procesie przywracania integralności błon komórkowych, które uległy uszkodzeniu wskutek degeneracyjnych chorób oczu (np. jaskry).

W przypadku uszkodzeń nabłonka rogówki i spojówki, roztwory zawierające kwas hialuronowy tworzą mikrośrodowisko sprzyjające procesom regeneracji powierzchni oka.

Kwas hialuronowy, który uzyskuje się metodą syntezy biotechnologicznej, tworzy roztwory mukomimetyczne, mukoadhezyjne i wiskoelastyczne, pozwalające zwiększyć stabilność filmu łzowego, a tym samym zapewnić odpowiedni poziom nawilżenia, natłuszczenia i ochrony powierzchni oka.

Kiedy stosować Citogla VIS LF OMK1[®]-LF?

Dzięki obecności cytykoliny i jej strukturalnemu oddziaływaniu na komórki zwojowe siatkówki, preparat Citogla VIS LF OMK1[®]-LF jest wskazany jako środek wspomagający w przeciwnadciśnieniowym leczeniu pacjentów z jaskrą. Ponadto nawilżające i ochronne właściwości preparatu zapewniają ulgę w przypadku podrażnień, uczucia pieczenia i wrażenia obecności ciała obcego w oku, wywołanych czynnikami środowiskowymi, zabiegami chirurgicznymi

lub na skutek zapalenia spojówek.

Sposób użycia:

1 kropla 3 razy dziennie, zależnie od potrzeb.

Uwagi i środki ostrożności:

- wstrząsnąć przed użyciem
- nie stosować, jeśli butelka jest uszkodzona
- nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu
- nie stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu
- nie dotykać oka końcówką butelki
- po zastosowaniu widziany obraz może ulec tymczasowemu rozmyciu – zaleca się odczekanie kilku sekund przed przystąpieniem do czynności, które wymagają ostrości widzenia
- po zastosowaniu należy odczekać 10-15 minut przed użyciem innych, stosowanych miejscowo produktów leczniczych do oczu
- należy zużyć w ciągu 30 dni od pierwszego otwarcia butelki
- przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
- produkt przeznaczony wyłącznie do oczu, do użytku zewnętrznego
- przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, z dala od światła
- po użyciu nie należy wyrzucać butelki do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.



Producent:

Omikron Italia S.r.l.

Viale B. Buozzi, 5 - 00197 Rzym, Włochy



Dystrybutor:

Solinea Sp. z o.o. Sp. K.

Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn, Polska

Data ostatniej aktualizacji: wrzesień 2018 r.

Nr patentu w Europie: EP2538918

Nr patentu w Stanach Zjednoczonych: US8822429

Nr patentu w Japonii: JP5801324

Nr patentu międzynarodowego: PCT/IB2017/056400 (w trakcie)

