

Ectifem

nawilżające globulki dopochwowe
z **ektoiną** i **kwasem hialuronowym**

Przed zastosowaniem preparatu **Ectifem** należy zapoznać się z poniższymi informacjami. Należy zachować niniejszą ulotkę, gdyż zawiera ona ważne informacje. W razie wątpliwości dotyczących użytkowania preparatu **Ectifem** należy skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub wytwórcą.

Ectifem to preparat wspomagający leczenie stanów zapalnych oraz regenerację błony śluzowej pochwy. Globulka **Ectifem** rozpuszcza się w pochwie, powlekając ją nawilżającą warstwą, chroniącą błonę śluzową przed podrażnieniami.

Zawarte w preparacie **ektoina** oraz **kwasy hialuronowe** wspomagają prawidłowy poziom nawilżenia błony śluzowej pochwy, łagodząc uczucie suchości, napięcia, pieczenie i świąd. Dodatkowo **ektoina** – występująca w przyrodzie, naturalna cząsteczka, wykazuje właściwości chroniące komórki, łagodzące stany zapalne oraz stabilizujące błony komórkowe.

Ectifem jest przeznaczony dla kobiet w celu:

- łagodzenia uczucia suchości i dyskomfortu (pieczenie, świąd, napięcie)
- przywrócenia prawidłowego poziomu nawilżenia błony śluzowej pochwy w stanach związanych ze zmianami hormonalnymi we wszystkich okresach życia, w tym w okresie menopauzy
- wspomagania regeneracji błony śluzowej pochwy i łagodzenia objawów spowodowanych przyjmowaniem leków oraz będących następstwem chemio- i radioterapii
- łagodzenia bólu w przypadku bolesnych stosunków

Skład:

Ektoina (Ectoin®), kwas hialuronowy, Witepsol S58.

Sposób użycia:

Kuracja wstępna: 1 globulka dopochwowa dziennie, najlepiej tuż przed snem, przez 7 dni lub zgodnie z zaleceniem lekarza.

Kuracja podtrzymująca: 1 globulka dopochwowa 2-3 razy w tygodniu lub według zaleceń lekarza.

Przeciwwskazania i środki ostrożności:

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
- Nie potykać.
- Nie stosować podczas menstruacji oraz na uszkodzoną błonę śluzową pochwy.
- Nie stosować preparatu jednocześnie z innymi preparatami dopochwowymi bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.
- W razie stwierdzenia jakichkolwiek dolegliwości należy zaprzestać stosowania.
- Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed użyciem powinny skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować, jeśli opakowanie zostało wcześniej otwarte lub uszkodzone.
- Nie używać po upływie terminu ważności. Data ważności dotyczy produktu prawidłowo przechowywanego.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Opakowanie:

Opakowanie zawiera 10 globulek dopochwowych.

Ectifem

nawilżające globulki dopochwowe
z ektoiną i kwasem hialuronowym



Stan informacji: 07/2023



termin ważności



numer partii



przed użyciem zapoznać się z instrukcją użytkowania



wytwórca

 **Wytwórca:**



Solinea Sp. z o.o.
Elizówka, ul. Szafranowa 6
21-003 Ciecierzyn, Polska
Wyprodukowano w UE