



# IODIM<sup>®</sup>

Sterylnie  
krople do oczu

Butelka ze szkła oranżowego o pojemności  
10 ml z zakraplaczem i zakrętką

Trójglicerydy średniołańcuchowe (MCT) - Hialuronian sodu (NaHA)



## **SKŁAD**

Trójglicerydy średniołańcuchowe (MCT 0.11%), Hialuronian sodu (NaHA 0,05%), Glicerol, Witamina E TPGS, Cytrynian potasu, Chlorek sodu, Kwas cytrynowy jednowodny, Jodopowidon 0,6%, Woda oczyszczona.

## **OPAKOWANIE**

**IODIM<sup>®</sup>** Butelka ze szkła oranżowego o pojemności 10 ml z zakraplaczem i zakrętką zawierająca sterylnie krople do oczu, umieszczona w kartonowym opakowaniu.

## **CHARAKTERYSTYKA I MECHANIZM DZIAŁANIA**

**IODIM<sup>®</sup>** to okulistyczny, sterylny, izotoniczny roztwór na bazie lipidów ze względu na obecność trójglicerydów średniołańcuchowych (MCT). Zawiera również hialuronian sodu (polimer hydrofilowy), glicerol (substancja utrzymująca wilgoć), witaminę E TPGS, sole mineralne i jodopowidon (konserwant). **IODIM<sup>®</sup>** zawiera MCT, które oddziałują z zewnętrzną warstwą lipidową filmu łzowego i tworzą warstwę ochronną, która utrudnia nadmierne parowanie wodnego składnika łez; zawiera hialuronian sodu, który oddziałuje mechanicznie z warstwą mucynową filmu łzowego, zatrzymuje wodę i przyczynia się do utrzymania stabilnej powierzchni oka przez długi czas. Wystarczą jedynie 2 zakroplenia dziennie, aby zapewnić uczucie komfortu i poprawić stan powierzchni oka. **IODIM<sup>®</sup>** zawiera również glicerol, który ma działanie nawilżające, sole mineralne (sód, potas, chlorek i cytrynian), które pełnią funkcję odżywczą powierzchni oka, a także regulują pH i osmolarność łez, witaminę E TPGS, która wspomaga zwilżalność powierzchni oka oraz jodopowidon gwarantujący sterylność roztworu przed i po otwarciu butelki.

## **WSKAZANIA**

**IODIM<sup>®</sup>** nawilża, stabilizuje film łzowy i chroni powierzchnię oka we wszystkich przypadkach dysfunkcji filmu łzowego, również u pacjentów z nawracającymi infekcjami oczu. **IODIM<sup>®</sup>** może być stosowany jako wsparcie w profilaktyce przed i po zabiegach chirurgii okulistycznej (np. zaćma, iniekcje doszkliskowe, itp.).

## **DAWKOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA**

Usunąć plastikową blokadę zabezpieczającą umieszczoną na szyjce butelki (rysunek 1), odkręcić nakrętkę (rysunek 2).

- Odchylić głowę lekko do tyłu i palcem wskazującym odciągnąć dolną powiekę, aby utworzyć małą kieszonkę. Trzymać zakraplacz pionowo, końcówką skierowaną w dół nad okiem (Rysunek 3).
- Patrząc w górę zakroplic 1 lub 2 krople do oka delikatnie ściskając zakraplacz (Rysunek 4), 1-2 razy dziennie, według zaleceń specjalisty, następnie delikatnie zamknąć powiekę na kilka chwil, aby roztwór mógł rozprowadzić się na powierzchni oka.

## **SPOSÓB PRZECHOWYWANIA I OKRES WAŻNOŚCI**

- Nie używać produktu po upływie okresu ważności wskazanego na opakowaniu. Okres ten dotyczy produktu przechowywanego w lodówce w temperaturze (2°C-8°C).
- Chronić produkt przed światłem i przechowywać butelkę w kartonowym opakowaniu.
- Produkt zużyć w ciągu 28 dni od otwarcia, po tym czasie wszelkie niewykorzystane pozostałości

## **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI / OSTRZEŻENIA**


- Umyć ręce przed użyciem produktu
- Produkt jedynie do użytku okulistycznego
- Produkt jest przeznaczony dla jednego pacjenta
- Nie używać produktu, jeśli opakowanie przy pierwszym otwarciu jest uszkodzone lub nieprawidłowo zamknięte
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
- Nie stosować w przypadku szczególnej nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu
- Nie połykać roztworu
- Aby uniknąć jakiegokolwiek zanieczyszczenia, nie dotykać zakraplaczem żadnej powierzchni oraz unikać bezpośredniego kontaktu z okiem
- W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem
- Nie zakraplać do oka jednocześnie z innymi produktami okulistycznymi, ponieważ może to zmienić ich działanie, a między każdym zakropieniem należy zachować odstęp co najmniej 15 minut
- Nie stosować produktu po upływie daty ważności podanej na opakowaniu
- Nie stosować przy założonych soczewkach kontaktowych
- Szczelnie zamknąć butelkę natychmiast po użyciu
- Data ważności odnosi się do nieuszkodzonego i prawidłowo przechowywanego produktu
- Stosować u osób dorosłych
- Po zakropieniu produktu **IODIM®** może wystąpić przemijające uczucie pieczenia lub szczypania

**Data ostatniej aktualizacji:** styczeń 2021



**Rysunek 1**

Wyjąć butelkę z opakowania i usunąć plastikową blokadę zabezpieczającą umieszczoną na szyjce butelki.

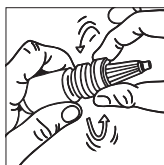


**Rysunek 2**

Odkręcić zakrętkę.



**Rysunek 3**

Odchylić głowę lekko do tyłu i palcem wskazującym odciągnąć dolną powiekę, aby utworzyć małą kieszonkę. Trzymać zakraplacz pionowo, końcówką skierowaną w dół nad okiem.

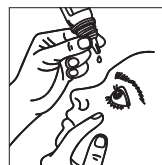

**Rysunek 4**

Patrząc w górę zakropić 1 lub 2 krople do oka delikatnie ściskając za zakraplacz.



Recykling



Zapoznać się z ulotką



Nie przechowywać w temperaturze wyższej niż 8°C



Sterylizacja przy zastosowaniu techniki aseptycznej



Kod kraju produkcji



Wyrób medyczny



Przechowywać z daleka od światła słonecznego



0476



Medivis s.r.l.  
Via Carnazza, 34 C  
95030 Tremestieri Etneo, Catania, Włochy



**Dystrybutor:**  
Solinea Sp. z o.o.  
Elizówka, ul. Szafranowa 6  
21-003 Ciecierzyn, Polska

NOT32107W01