

Muconasin

spray do nosa

Uplynnina wydzielinę
Udrożnia nos i zatoki

N-acetylocysteina 6%
NaCl 3%

Bez konserwantów
Butelka 30 ml z aplikatorem
i nasadką ochronną

1. CHARAKTERYSTYKA, SKŁAD I ZASTOSOWANIE WYROBU MEDYCZ- NEGO

1.1 OPIS I WSKAZANIA

Spray do nosa Muconasin to wyrób medyczny zawierający 6% roztwór N-acetylocysteiny oraz 3% hipertoniczny roztwór soli o kontrolowanym pH. Stosowanie Muconasin wskazane jest w celu upłynnienia i ułatwienia mechanicznego usunięcia wydzieliny śluzowej lub śluzowo-ropnej zalegającej w jamie nosowej (ostry, podostry i wolno ustępujący nieżyt nosa, przewlekły i śluzowo-skrzepowy nieżyt nosa, naczynioruchowy nieżyt nosa) oraz wewnątrz zatok przynosowych (ostre i przewlekłe zapalenie zatok), łagodząc objawy i przebieg ostrych, podostrych i przewlekłych stanów zapalnych górnych dróg oddechowych.

1.2 PRZECIWSKAZANIA I OGRANICZENIA STOSOWANIA

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Spray do nosa Muconasin jest przeciwwskazany u dzieci poniżej 2. roku życia. W okresie ciąży i karmienia piersią spray do nosa Muconasin należy stosować tylko w razie bezwzględnej konieczności i pod bezpośrednim nadzorem lekarza.

1.3 SKŁAD

Jedna butelka 30 ml zawiera: N-acetylocysteinę 1,8 g, chlorek sodu 0,9 g. Substancje pomocnicze: wodorotlenek sodu, wersenian sodu, woda oczyszczona.

1.4 MECHANIZM DZIAŁANIA

Spray do nosa Muconasin rozrzedza gęsty i lepki śluz dzięki fizycznemu i mechanicznemu działaniu jego składników:


- buforowany hipertoniczny roztwór chlorku sodu: hipertoniczne roztwory soli podawane bezpośrednio na błony śluzowe dróg oddechowych transportują wodę na zasadzie osmozy. Zwiększa to procentową zawartość wody w śluzie wyścielającym nabłonek, rozrzedzając go, a tym samym ułatwiając jego usuwanie.
- N-acetylocysteina: acetylowana pochodna aminokwasu cysteiny, wywiera działanie mukolityczne poprzez bezpośredni kontakt ze śluzem. Działanie to zachodzi dzięki obecności w cząsteczce grup sulfhydrylowych, zdolnych do rozrywania wiązań dwusiarczkowych mukoprotein nadających śluzowi lepkość, powodując jego depolimeryzację.

2. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Roztwór w szklanej butelce o pojemności 30 ml, z pionowym aplikatorem i nasadką ochronną.

3. SPOSÓB UŻYCIA

Poprawny sposób użycia: zdejmij nasadkę ochronną, odchyl głowę lekko do tyłu, delikatnie umieść aplikator w otworze nozdrza, naciśnij dwoma palcami podstawę aplikatora i rozpyl 2-3 razy. Powtórz procedurę w drugim nozdrzu. Oczyszcz aplikator i załóż nasadkę ochronną. Dobrze wstrząsnąć przed użyciem.

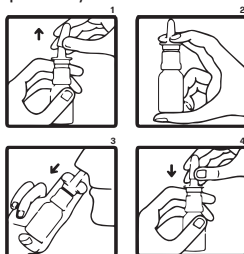

3.1 DAWKA, SPOSÓB I CZAS PODANIA

Zalecana dawka to 2-3 rozpylenia aerozolu do każdego otworu nosowego dwa do trzech razy dziennie przez nie więcej niż 10 dni, w zależności od leczonych objawów klinicznych. Kurację tę można powtarzać kilkakrotnie w ciągu roku, przerywając stosowanie preparatu na co najmniej 1 tydzień pomiędzy cyklami. Zużyć w ciągu 2 miesięcy od pierwszego użycia.

3.2 ZNANE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Wysokie stężenie soli w roztworze może powodować naturalne uczucie pieczenia po aplikacji, znikające w ciągu kilku minut. Stosowanie się do zaleceń zawartych w ulotce zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

4. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze pokojowej (nie wyższej niż 25°C) z dala od światła i źródeł ciepła. Termin ważności odnosi się do produktu nieotwartego i prawidłowo przechowywanego.

5. OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Spray do nosa Muconasin po rozpyleniu ma zapach siarki, który nie wpływa na właściwości preparatu. Po każdym użyciu sprayu należy przemyć aplikator. Po użyciu zaleca się ponowne założenie nasadki ochronnej. Nie stosować w przypadku indywidualnej nadwrażliwości lub alergii na którykolwiek ze składników produktu.

Długotrwałe stosowanie produktów miejscowych może prowadzić do nadwrażliwości; jeśli wystąpią takie objawy, należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie używać wyrobu medycznego po upływie terminu ważności. Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone. Nie połykać. Nie rozpylać do oczu. Używanie tej samej butelki przez więcej niż jedną osobę może ułatwić przenoszenie infekcji.

6. UTYLIZACJA

Po upływie terminu ważności lub gdy wyrób wymaga utylizacji, należy postępować zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami wydanymi przez odpowiednie władze lokalne. W każdym przypadku należy odpowiedzialnie pozbyć się produktu i jego opakowania.



Przechowywać poza zasięgiem dzieci

Rev. 00

Stan informacji: 05/2023



Wytwórca:

Pharma Line S.r.l.
Via Bertani 2, 20154
Mediolan, Włochy



Dystrybutor:

Solinea Sp. z o.o.
Elizówka 65, 21-003
Ciecierzyn, Polska