

# NEBU-dose



## HIPERTONIC

### ZASTOSOWANIE

NEBU-dose HIPERTONIC to 3% roztwór soli, w postaci pojedynczych ampułek, bez konserwantów, przeznaczony do nebulizacji. Działanie produktu opiera się na wykorzystaniu mechanizmów ułatwiających ruch wydzieliny w drogach oddechowych, poprawiając komfort oddychania poprzez:

- rozbijanie wiązań jonowych wydzieliny śluzowej, dzięki czemu zmniejsza się lepkość i elastyczność wydzieliny;
- absorpcję wody z błony śluzowej i podśluzowej, ograniczając obrzęk ścian dróg oddechowych;
- pobudzenie kaszlu i wykrztuszania jako mechanizmów wspomagających usuwanie śluzu zalegającego w oskrzelach, co prowadzi do udroźnienia dróg oddechowych.

NEBU-dose HIPERTONIC do stosowania w terapii inhalacyjnej jest szczególnie zalecany dla pacjentów cierpiących na zapalenie oskrzelików, ostre zapalenie oskrzeli, mukowiscydozę oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). Preparat może być również stosowany jako nośnik dla innych leków przeznaczonych do inhalacji.

## SPOSÓB UŻYCIA

Preparat może być podawany przy użyciu dowolnego rodzaju nebulizatora. Zaleca się przestrzegania instrukcji użytkowania określonych przez producenta urządzenia. Do jednorazowej inhalacji używać 4 lub 5 ml roztworu, zgodnie z zaleceniami lekarza.

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
  - Produkt nie zawiera konserwantów. Po otwarciu ampułki należy natychmiast zużyć jej zawartość, a po użyciu pozbyć się ampułki celem uniknięcia zanieczyszczeń mogących stanowić źródło infekcji.
  - Nie stosować preparatu w połączeniu z innymi lekami bez konsultacji z lekarzem prowadzącym.
  - U pacjentów bardzo wrażliwych, preparat należy podawać zgodnie z zaleceniami lekarza, ponieważ w pierwszej kolejności może być konieczne podanie leku rozszerzającego oskrzela.
  - W przypadku skurczu oskrzeli lub uporczywego kaszlu należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.
  - Nie stosować w przypadku uszkodzenia ampułki.
  - Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 25 °C.

## SKŁAD

Jałowy roztwór chlorku sodu 3%



UNOLAB MANUFACTURING, S.L.  
Av/ De las flores 6, 28970  
Humanes de Madrid (Madrid), Hiszpania

## DYSTRYBUTOR



Solinea Sp. z o.o Sp. K.  
Elizówka 65  
21-003 Ciecierzyn

Rev.2016/NOV/21



300523