

# Somilux

Patented Medical Device

Do użytku zewnętrznego  
10 ml

## Krople do oczu

**Somilux** to krople do oczu zawierające laktoferynę liposomalną. Laktoferyna jest jednym z białek najczęściej występujących w filmie łzowym. Dzięki zdolności laktoferyny do wiązania jonów żelaza wykazuje ona właściwości przeciwzapalne oraz hamujące wzrost mikroorganizmów. Schorzenia narządu wzroku jak zapalenie powiek i spojówek, a także choroby układu, zabiegi operacyjne, podeszły wiek, czynniki środowiskowe (drobny pył, smog, alergeny) czy czynniki nadwyrężające narząd wzroku (długotrwała praca przy komputerze, soczewki kontaktowe, nadmierna ekspozycja na wiatr i słońce) mogą wpływać na znaczne zmniejszenie ilości laktoferyny w filmie łzowym, a zatem zwiększać ryzyko infekcji i stanów zapalnych oczu. Somilux przywraca prawidłową ilość laktoferyny w filmie łzowym, skutecznie przeciwdziałając zaburzeniom narządu wzroku, infekcjom bakteryjnym (wywołanym przez bakterie Gram-), a także zmniejsza zaczerwienienie, suchość i kłucie w oczach. Dodatkowo, wbudowanie laktoferyny do liposomów zapewnia jej stabilność biologiczną, a także zwiększa biodostępność i skuteczność.

### Zawartość opakowania:

10 ml jałowego roztworu w butelce wielodawkowej zamkniętej w kartonowym opakowaniu z ułotką.


### Skład:

Woda, laktoferyna liposomalna, gliceryna, hialuronian sodu, witamina E, EDTA, bufor TRIS.

### Wskazania:

Somilux to wyrób medyczny do oczu w postaci roztworu z liposomalną laktoferyną o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych, nawilżających i chelatujących jony żelaza. Produkt chroni oko w przypadku ryzyka wystąpienia przed- i pooperacyjnych zanieczyszczeń mikroorganizmami, jest wskazany do wspomagania leczenia krwotoku podspojówkowego, przekrwienia oka i zespołu suchego oka wywołanych przez stany zapalne i dysfunkcje gruczołów łzowych. Skutecznie pomaga w redukcji zaczerwienienia i podrażnienia oczu, nawilża oraz chroni powierzchnię oka zapewniając długotrwałą ulgę.

## Sposób użycia:

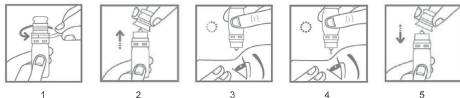

1. Aby otworzyć butelkę, należy pociągnąć za pierścień zabezpieczający.
2. Zdjąć nasadkę pociągając ją do góry.
3. Odchylić lekko głowę do tyłu, delikatnie odciągnąć dolną powiekę w dół i spojrzeć w górę.
4. Przekręcić butelkę do góry dnem i delikatnie przyciskając zakropić 1-2 krople do każdego oka.
5. Zamknąć butelkę.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

U kobiet ciężarnych i karmiących piersią oraz u dzieci zalecana jest konsultacja z lekarzem przed użyciem produktu. Jednoczesne stosowanie podobnego preparatu na tę samą część ciała może zmniejszać skuteczność i bezpieczeństwo wyrobu. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie połykać. Nie używać, jeśli wyrób jest uszkodzony. Nie używać po upływie daty ważności. Data ważności dotyczy produktu w nienaruszonym stanie i prawidłowo przechowywanego. Nie stosować dłużej niż 30 kolejnych dni. Produkt jest jałowy do momentu otwarcia. Przedłużone stosowanie może dawać objawy uczuleniowe. Jeśli się one pojawią, należy zaprzestać stosowania i skonsultować się z lekarzem. Należy pamiętać o zgłaszaniu działań niepożądanych nieopisanych w ulotce do lekarza lub farmaceuty.

## Przeciwwskazania:

Znana nadwrażliwość na składniki produktu.

## Przechowywanie:

Przechowywać opakowanie szczelnie zamknięte, w temperaturze nieprzekraczającej 25°C, w suchym miejscu, z dala od źródeł światła i ciepła. Po otwarciu opakowania produkt należy zużyć w ciągu 3 miesięcy.


## Legenda:

 - sterylne w aseptycznym procesie produkcyjnym

 - Instrukcja użytkowania dołączona do opakowania

 - Wytwórca

 - kod wyrobu medycznego

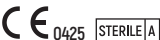

 ES00587DCCC1

rev. 3 z 07/05/2021

Patent Europejski

 Wytwórca: **TDC** Technology Dedicated to Care  
Technology Dedicated to Care S.r.l.  
Via Copernico 38,  
20125 Milano, Włochy

Dystrybutor: 

Solinea Sp. z o. o. Sp. K.  
Elizówka 65  
21-003 Ciecierzyn